

Analysenavn	Csv—Glucose; stofk.
Kortnavn	Glukose;Csv
Synonym	-
Forkortelse	GLK-CSV
IUPAC kode	NPU02190
Kvantitetsnummer	000729
Instruktion for rekvirent	<p>Analyseres dagligt.</p> <p>De først tappede dråber bør helst ikke opsamles, da de kan være forurenede med vævsvæske eller blod.</p> <p>Angiv prøvetagningstidspunkt. Spinalvæsken skal senest 30 minutter efter prøvetagning afleveres i prøveindleveringen på Klinisk Kemisk Afdeling, der i forvejen er blevet adviseret. Ved ordination af Csv—Glucose; stofk. bestilles samtidig P—Glucose; stofk.</p> <p>Rutineprøver skal være Klinisk Kemisk Afdeling i hænde senest kl. 14.00.</p>
Prøvemateriale	<p>2 mL spinalvæske i spidsglas med skrivefelt</p> <p>Holdbarheden er 30 minutter ved stuetemperatur.</p>
Prøvetagning	Se ovenstående.
Referenceinterval	<p>2,2 - 3,9 mmol/L</p> <p>Glucosekoncentrationen i spinalvæsken vil normalt være ca. 70% af glucosekoncentrationen i plasma.</p>
Analyseusikkerhed	4 %
Unormale værdier	<p>Nedsatte værdier ses ved bakterielle infektioner, ved maligne svulster med indvækst i subarachnoidalrummet.</p> <p>Forhøjede værdier ses ved encephalitis, samt ved forskellige tilstande med forhøjet intrakranielt tryk.</p> <p>Blodtilblanding kan medføre falsk forhøjede værdier.</p>

Seneste opdatering 23.07.13